

MICRODERMOABRACION



Descripción detallada del Equipo

Equipo de la belleza de la limpieza de la piel de la máquina del microdermoabrasión 1diamond aprobaron

Funciones:

* Diamante Microdermoabrasión

Proporciona un procedimiento no quirúrgico para la piel, usando las cabezas estéril del diamante para desgastar o para frotar apagado el top de la primera capa de la piel, después limpiar hacia fuera las partículas con la aspiradora junto Con cualquier suciedad y respaldo muerto de la piel.

El Equipo puede tratar:

- Envejecimiento y piel sol-dañada
- Algunos tipos de marcar con una cicatriz del acné y de acné
- Pigmentación alterada
- Marcas de estiramiento
- Líneas finas



* Ultrasonido

El ultrasonido con 2 puntas de prueba proporcionó la elevación no-quirúrgica, que utiliza vibraciones acústicas para reducir las líneas que salen de la empresa de la piel y para alisarlas.

Puede ayudar al cosmetólogo a aplicar el tratamiento de la recuperación después de pelar el tratamiento.

6 en 1 diamante Dermoabrasión, equipo de la peladura del diamante (CE aprobado)
- Poros agrandados y estorbados

Parámetros:

Funciones	Especificaciones
Diamante Dermabrasion	Presión del vacío: 60-70 cmHg

Detalles de empaquetado:

Artículo NO.	Voltaje	Frecuencia	Poder	Medida	Peso bruto
NV-666	100V- 120V, 220V- 240V.	50Hz- 60Hz.	150 vatios	52*48*30 CM	12,1 KILOGRAMOS

-1 garantía del año con la ayuda profesional del ingeniero.
- En el plazo de 1 año, suministre los recambios gratis si la máquina tiene problema de la calidad.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRESENTACION


La microdermoabrasión se ha impuesto como un método altamente eficaz para tratamientos superficiales de imperfecciones de la piel. Este procedimiento no es quirúrgico ni doloroso, ni tampoco implica ninguna clase de secuela. El mecanismo es sencillo: puntas de diamantes desgastan la superficie de la piel, mientras que van succionando los desechos que se producen. Así, se remueven las células muertas, y se propicia la consecuente regeneración tisular.

Evidentemente, el componente más importante del equipo es la punta diamantada que está en contacto con la piel. Por ello, las puntas poseen un diseño adecuado para las diversas aplicaciones, donde se busca el mejor resultado pero teniendo siempre en cuenta la calidad de la abrasión, en especial la granulación del tamaño del cristal y la correcta forma redondeada que no produce Ningún tipo de corte o

daño inesperado, efecto que es común observar en puntas incorrectamente diseñadas.

Otro factor importante es la succión neumática que se realiza en el mango portapuntas. Cabe destacar que dicha succión o efecto vacío no es utilizado sólo para eliminar células y tejidos de desecho, sino también para ciertos tratamientos donde se desea que el contacto piel-diamante sea el más alto posible. A tal efecto, se debe proporcionar una alta potencia de vacío. Este equipo ha sido diseñado siguiendo los lineamientos de Seguridad eléctrica de la norma IEC 60601.1 para asegurar un correcto desempeño ante cualquier condición de funcionamiento

Punta de Diamante

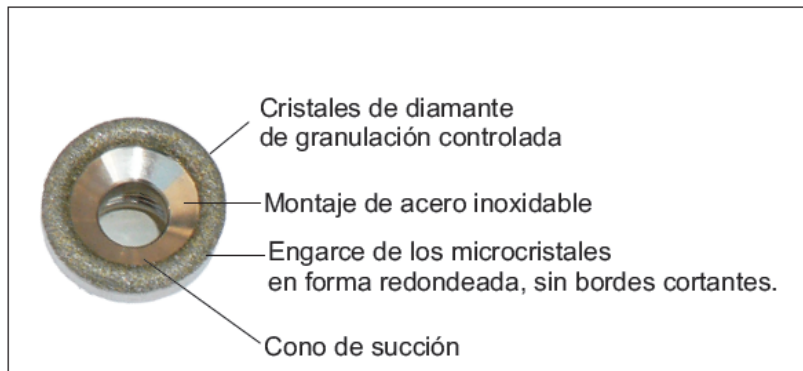

¿POR QUÉ USAR DIAMANTES?

El diamante es la sustancia natural más dura que existe. Forma una estructura cristalina y frágil, que al ser triturada produce aristas que no se desgastan y son las que se utilizan para la dermoabrasión.

Dicho proceso de trituración se efectúa en forma controlada, con lo que se obtienen los diferentes cristales, más gruesos o más finos, de acuerdo a la necesidad del usuario. Es importante destacar que el "secreto" de un buen tratamiento es justamente el cristal, que debe ser diamante legítimo, con su granulación perfecta. El otro factor importante es el engarce de los cristales en el soporte de acero inoxidable, dicho engarce debe definir una forma redondeada, para no producir cortes ni excesiva abrasión.

INDICACIONES

- Fotoenvejecimiento
- Manchas actínicas
- Arrugas
- Reducción de poros abiertos
- Piel seborreicas



- Estrías
- Cicatrices de acné, quirúrgicas o traumáticas
- Pielles flácidas

EFFECTOS COLATERALES

Existen diversos efectos no deseados, que en general son pasajeros y no revisten importancia. Sin embargo hay que prestar especial cuidado al estado de la piel a tratar, sobre todo si hay alguna sospecha de enfermedad dermatológica. Se produce frecuentemente un eritema leve y una sensación de ardor leve. Se puede observar sequedad transitoria y descamación muy suave por la propia exfoliación. Se describe una sensación de firmeza en la piel como la que se experimenta luego de exponerse al sol. Complicaciones La más frecuente es la hipopigmentación transitoria, que en general no reviste importancia y suele resolverse en unas semanas. También se puede producir una hiperpigmentación transitoria, que se trata con hidroquinona al 4 % y desaparece en poco tiempo. Algunos en pieles muy oscuras utilizan la hidroquinona de manera profiláctica un mes antes para proteger la piel de posibles hiperpigmentaciones. **En casos de Microdermoabrasiones profundas puede producirse una sobre infección secundaria al rascado, y generar una cicatrización defectuosa.**

NOTA

- GARANTIA 6 MESES
- SERVICIO TECNICO Y REFACCIONES POST GARANTIA
- CAPACITACION
- MANUALES EN ESPAÑOL

IESTGA

Muscle Sculpture

XEOMEEN

DERMAL

EPLINE

REVOFIL

SALKO

IT Pharma
INNOVATING TECHNOLOGY PHARMA

CLINICAL RESOLUTION

APARATOLOGIA

f Diestga **t Medic_estetica**

PROLLENIUM

9931082426 **9931572512**